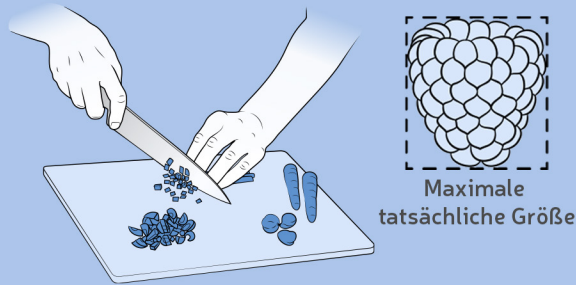
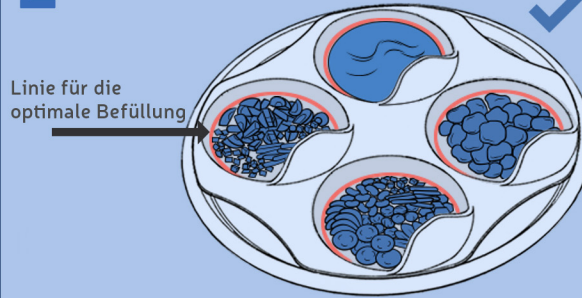
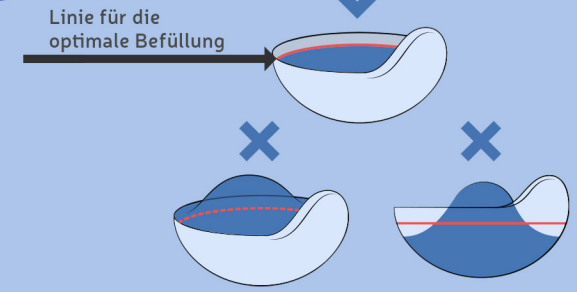


1 Essen zubereiten


Feste Nahrung: Bereiten Sie Stücke zu, die nicht größer als eine Himbeere sind. Halbfeste Nahrung: Geben Sie klebrigen Lebensmitteln zusätzliche Flüssigkeit hinzu, z. B. Haferbrei, Kartoffelpüree, Makkaroni mit Käse usw.

2 SCHÜSSELN BEFÜLLEN


Füllen Sie die Schüsseln bis zur Linie, jedoch nicht darüber hinaus.

3 FÜLLSTAND PRÜFEN


Stellen Sie sicher, dass sich die Lebensmittel nicht über oder unter der optimalen Fülllinie befinden. Eine Unterfüllung wird nicht empfohlen.

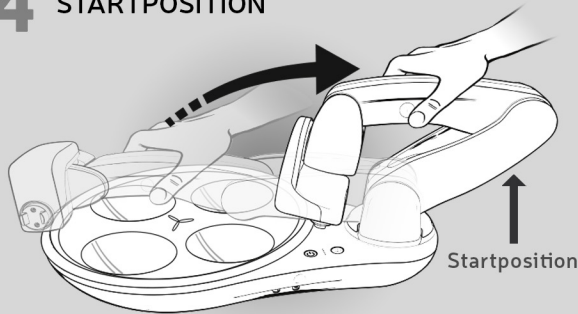4 STARTPOSITION


Legen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Bewegen Sie den Arm langsam in die gebeugte Ausgangsposition, wie abgebildet. Ein Widerstand ist normal. Der Obi lässt sich erst in der Ausgangsposition einschalten.

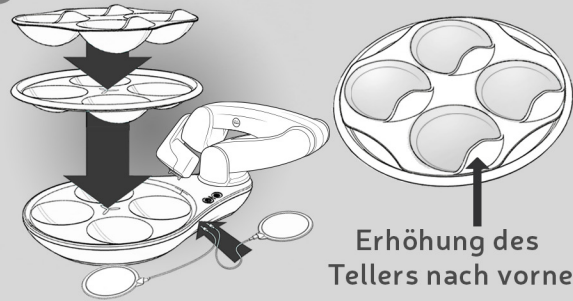5 TELLER, UNTERTELLER & TASTER


Teller und Essbesteck vor dem ersten Gebrauch reinigen. Schwarzes Unterteller einlegen und Teller darauflegen. Taster einstecken.

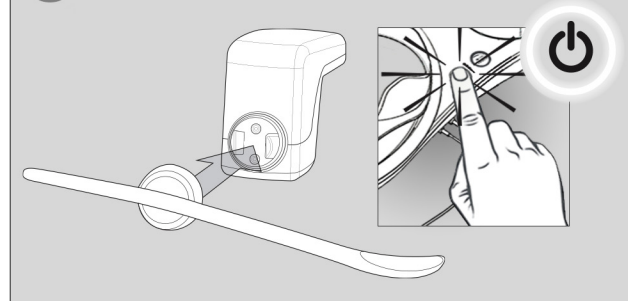6 ESSBESTECK ANBRINGEN

Befestigen Sie das gewünschte Essbesteck und drücken Sie dann den Einschaltknopf. Der Obi schaltet sich ein und verbeugt sich vor dem Essen.

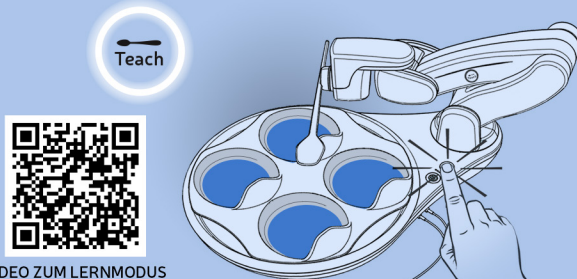
7 LERN-MODUS (TEACH) EINSCHALTEN

Bringen Sie den Benutzer in eine aufrechte und angenehme Position. Drücken Sie die Teach-Taste.

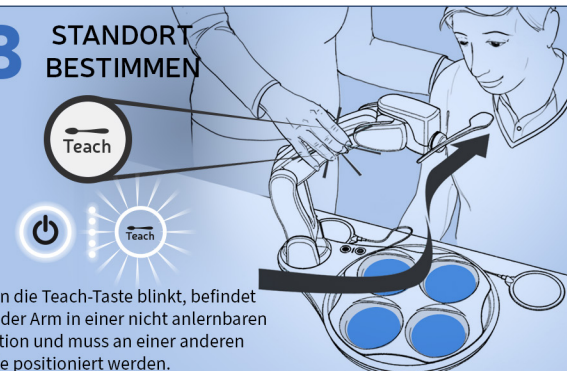8 STANDORT BESTIMMEN


Wenn die Teach-Taste blinkt, befindet sich der Arm in einer nicht anlernbaren Position und muss an einer anderen Stelle positioniert werden.

Greifen Sie den Arm, wobei der Daumen das Teach-Symbol bedecken muss. Stützen Sie das Gewicht des Arms, indem Sie ihn anheben. Bewegen Sie den Arm an die gewünschte Stelle vor den Mund des Benutzers. Lassen Sie den Arm an der gewünschten Stelle los. Der Obi hält die Position.

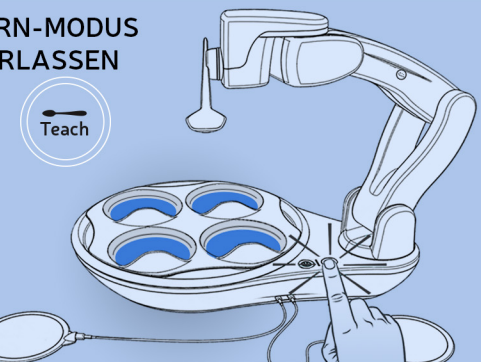
9 LERN-MODUS VERLASSEN

Drücken Sie die Teach-Taste erneut, um die Position zu speichern. Der Obi verlässt den Lern-Modus und fährt in die Startposition über der Schüssel. **⚠️ WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR.** Es darf keine Position im Mundraum abgespeichert werden.


ESSEN

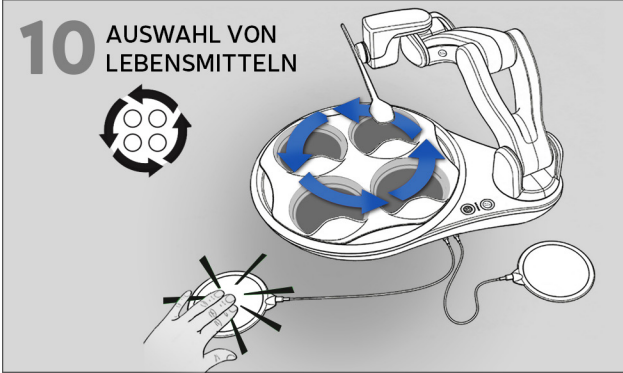

Drücken Sie den Auswahlsschalter, um das Essbesteck gegen den Uhrzeiger zu bewegen.

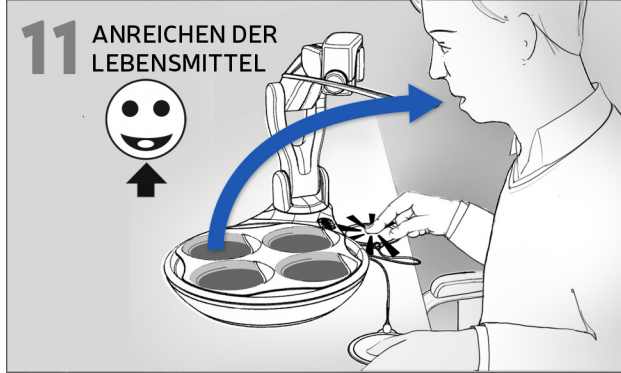


Drücken Sie den Taster, um Lebensmittel aufzunehmen und zur gespeicherten Position vor dem Mund zu transportieren.

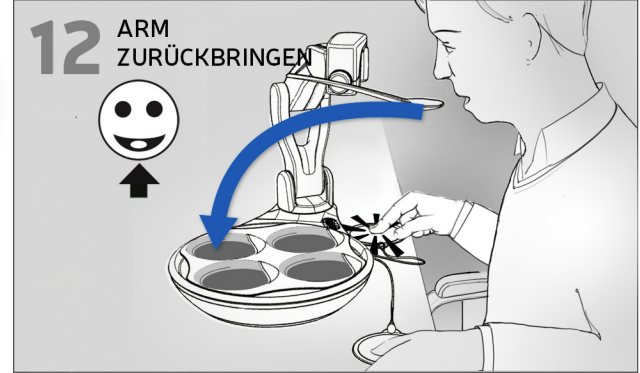


Drücken Sie den Abgabeschalter, um das Besteckteil wieder über die Schüssel zu bringen.

REINIGUNG

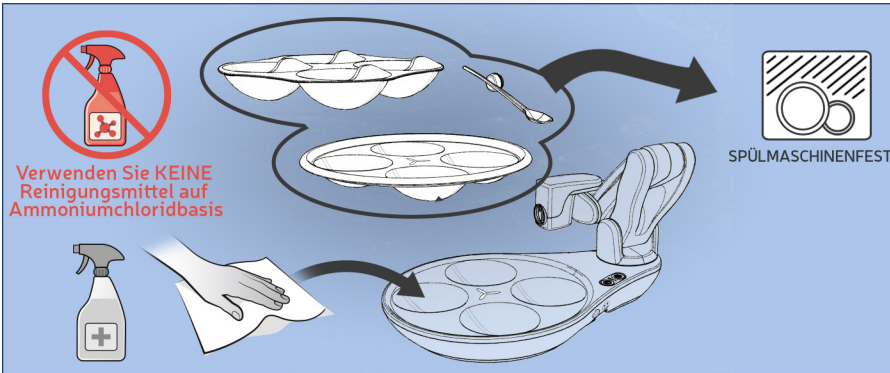


Reinigen/desinfizieren Sie Teller, Unterteller und Besteck im Spülbecken oder Geschirrspüler (oberes Fach). Reinigen/desinfizieren Sie das Obi Basisgerät und den Arm mit einer geeigneten Reinigungsmittel. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

KOLLISION

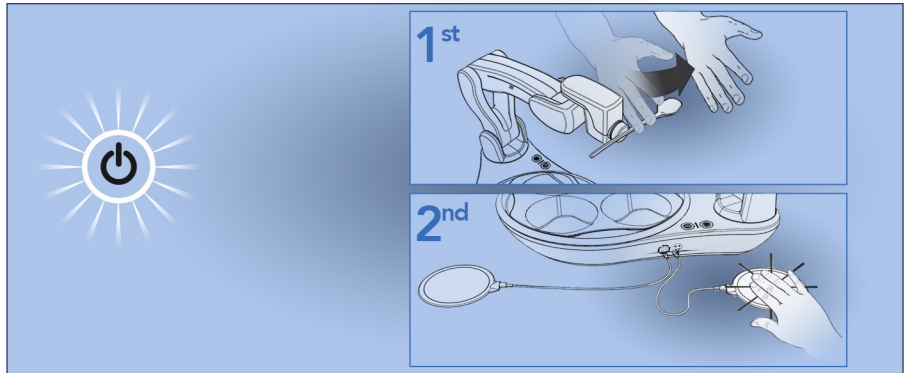

Wenn der Einschaltknopf blinkt, entfernen Sie bitte das Hindernis. Drücken Sie anschließend einen der Schalter, und der Arm setzt seine Bewegung fort.

LADEN

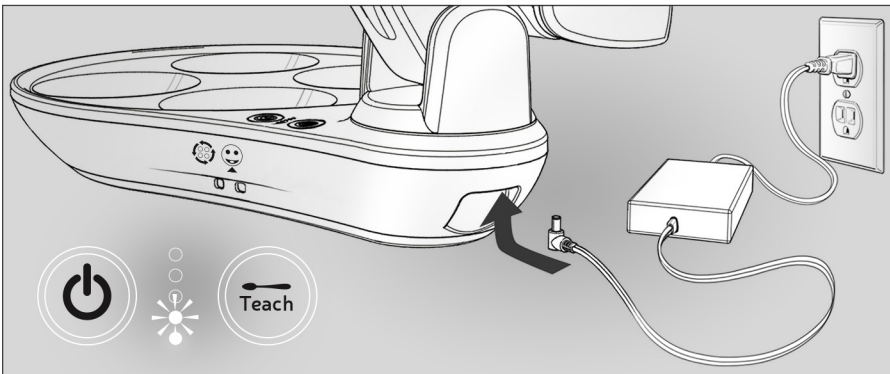

Schließen Sie das Ladekabel an. Alle Akkuanzeigen leuchten, wenn das Gerät vollständig geladen ist. Achten Sie bei längerer Lagerung von Obi darauf, dass der Akku zu 40–60 % geladen ist, um das Risiko einer leeren Batterie zu minimieren.

SERVICE



Wir helfen Ihnen gerne:
+1-844-435-7624 oder Service@MeetObi.com