



## 1 FÖRBEREDA MAT

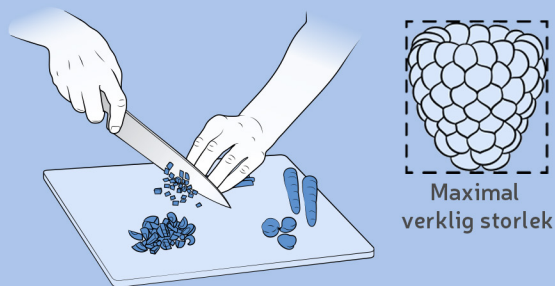

Fasta föda: Förbered bitar som inte är större än ett hallon. Halvfast föda: Tillsätt extra vätska till klabbig mat, t.ex. havregrynsgröt, potatismos etc.


## 2 FYLL PÅ MED MAT

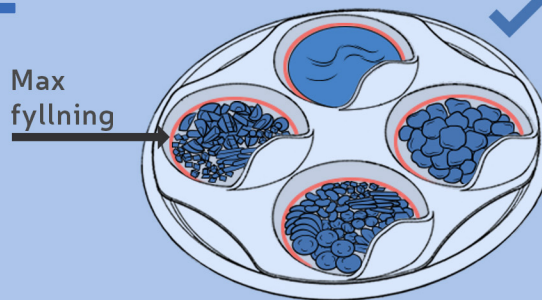

Fyll skålarna med mat. Överfyllning rekommenderas ej.


## 3 KONTROLLERA FYLLNINGSNIVÅN

Max fyllning

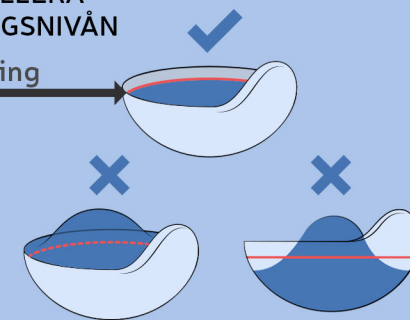


Se till att maten inte är över eller under den optimala fyllningslinjen. För lite påfyllning rekommenderas inte.

## 4 STARTPOSITION

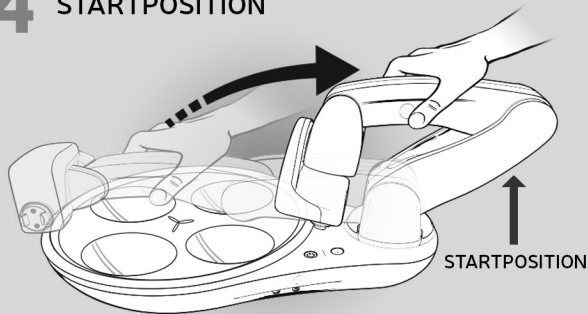


Placera enheten på en plan yta. För långsamt armen till det böjda startläget, som visas. Känslan av motstånd är normal. Obi slås inte på om den inte är i startläget.

## 5 PLACERA TALLRIK, TALLRIKSUNDERLÄGG & SÄTT I MANÖVERKONTAKTER

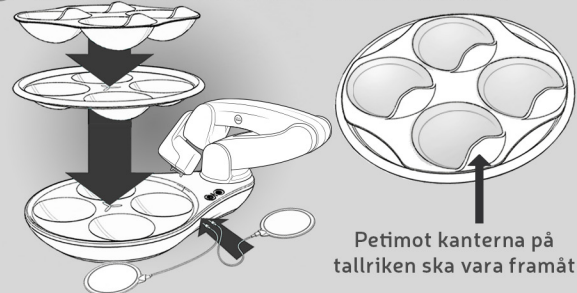


Rengör tallrik och bestick före första användningen. Placera först det färgade underlägget och sedan tallriken ovanpå. Sätt i manöverkontakter.

## 6 FÄST BESTICK

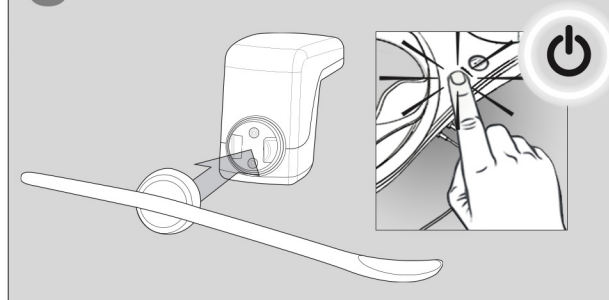


Fäst önskat bestick och tryck sedan på ON knappen. Obi slås på och bugar sig före måltiden.

## 7 GÅ IN I INLÄRNINGSLÄGE

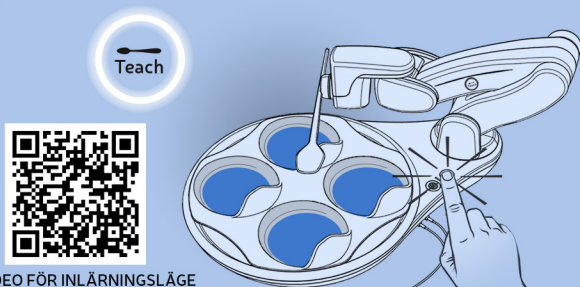


Placera användaren i upprätt position framför Obi och tryck på inlärningsknappen.

## 8 BESTÄM BESTICKETS PLACERING

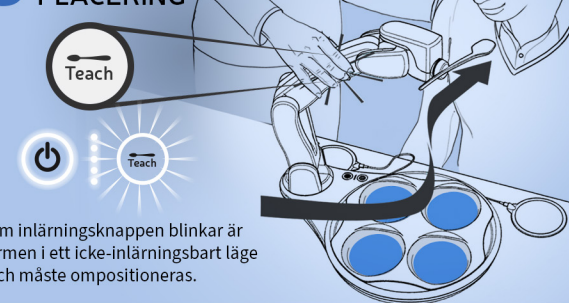


Ta tag i armen med tummen över "Teach" ikonen. Lyft och vrid armen för att placera besticken framför användarens mun. När du är på önskad plats, släpp armen. Obi kommer att hålla positionen.

## 9 AVSLUTA INLÄRNINGSLÄGET

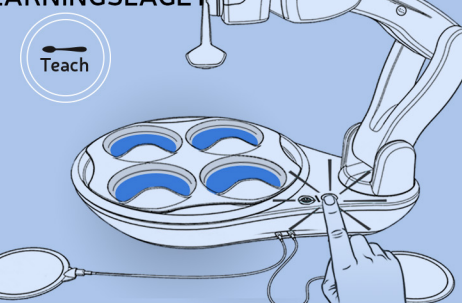


Tryck på "Teach" knappen igen för att spara positionen. Obi avslutar inlärningsläget och går till redoläget ovanför skålen. ⚠ VARNING: KVÄVNINGSRISK. Lär inte in en leverans position inuti munnen.

## 10 ATT VÄLJA MAT

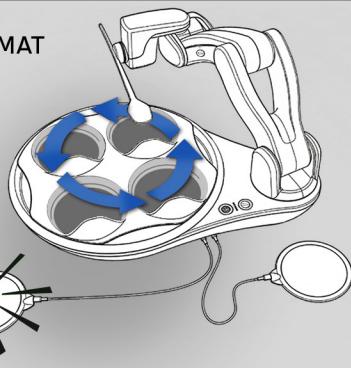


Tryck på välja knappen för att flytta besticket moturs.

## 11 LEVERERA MAT

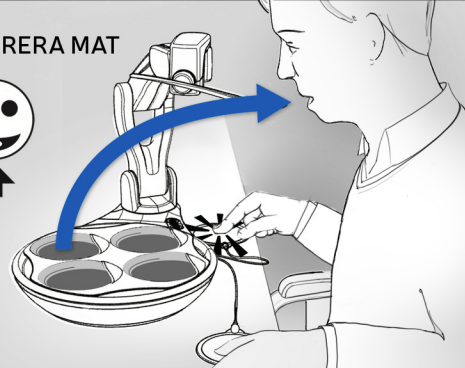

Tryck på leverans knappen för att ta mat på skedan och därefter transportera maten till vald position.


## 12 ÅTERGÅ MED ARM

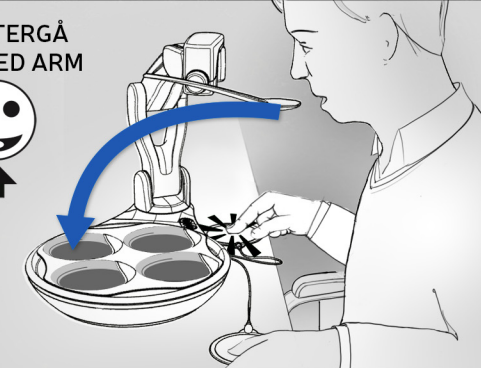

Tryck på leverera knappen för att återgå med skedan till skålen.




ANVÄND INTE rengöringsmedel baserade på ammoniumklorid

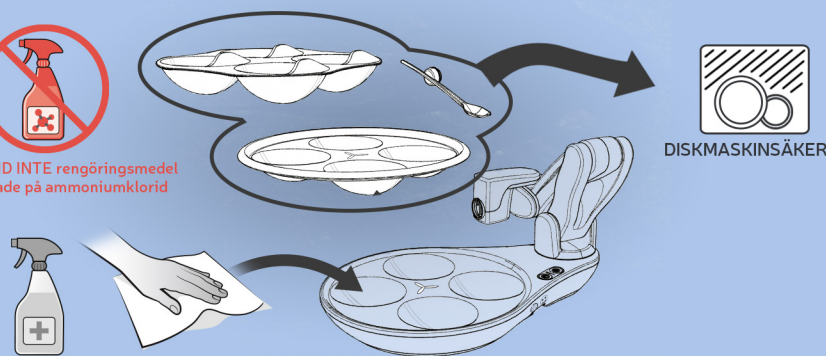


DISKMASKINSÅKER

Rengör/desinficera tallrik, tablett och bestick i en diskho eller diskmaskin (översta korgen). Rengör/desinficera Obis bas och arm med en kompatibel lösning. Se bruksanvisningen för mer information.

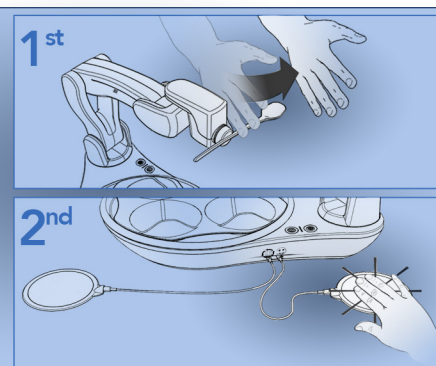1<sup>st</sup>2<sup>nd</sup>

Om strömknappen blinkar, ta bort det hindrande föremålet. När det har tagits bort, tryck på någon av kontakterna för att återupptar armens rörelse.

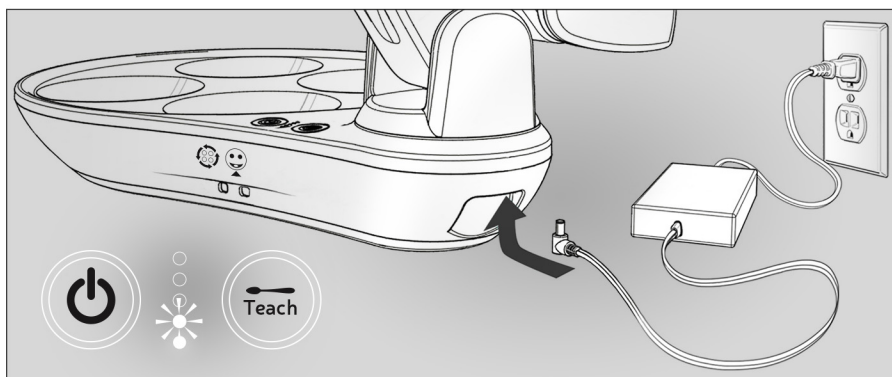

Anslut laddningskabeln. Alla batteriindikatorlampor tänds när enheten är fulladdad. När du förvarar Obi under en längre tid, se till att batteriet är laddat till 40–60 % för att minimera risken för att batteriet dör ur.



Vi hjälper dig gärna:  
**+1-844-435-7624** eller [Service@MeetObi.com](mailto:Service@MeetObi.com)