



1 TILBREDE MÅLTID

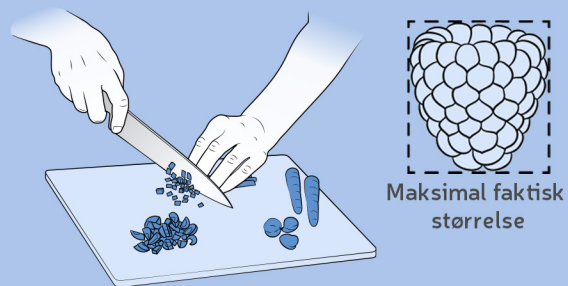


Faste fødevarer: Skær maden i stykker, der ikke er større end et hindbær., Blød mad: Tilsæt ekstra væske til cremede retter, f.eks. havregrød, kartoffelmos, makorni med ost m.m.

2 FYLD SKÅLE

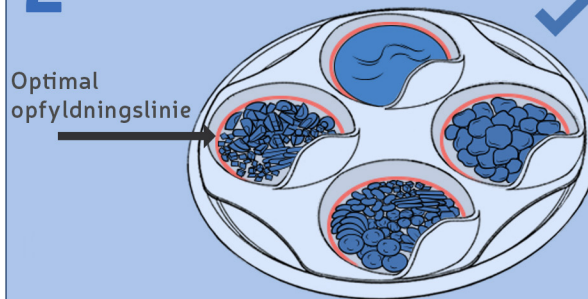


Fyld skålene op, men ikke over det optimale opfyldningsniveau.

3 KONTROLLER OPFYLDNINGSNIVEAUET

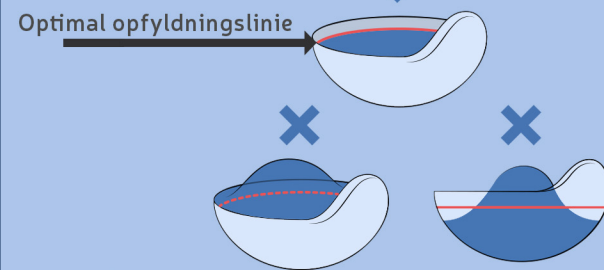


Sørg for, at maden ikke er over eller under den optimale fyldelinje. For lidt mad i skålen, anbefales ikke.

4 STARTPOSITION

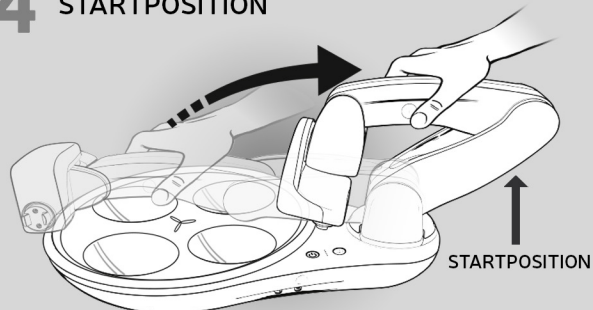


Placer enheden på en plan overflade. Bevæg langsomt armen til den bøjede startposition, som vist. Følelsen af modstand er normal. Obi tænder ikke, medmindre den er i startpositionen.

5 INDSÆTTETALLERKE, DÆKKESKIT & KONTAKTER

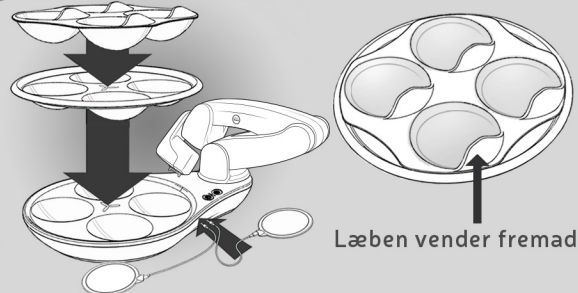


Rengør tallerken og ske før første brug. Læg den sorte dækketallerken i, og placer derefter den hvide tallerken ovenpå. Sæt kontakterne i.

6 FASTGØR SKE

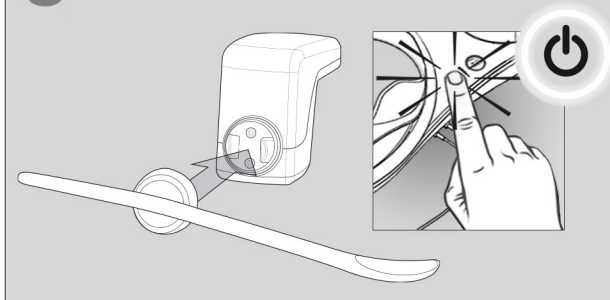


Påsæt den ønskede ske, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen. Obi tænder og bukker før måltidet.

7 TÆND LÆRINGSTILSTAND

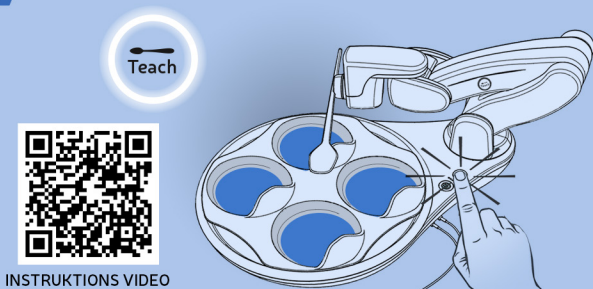


Placer brugeren, i oprejst og stationær siddeposition. Tryk på teachknappen.

8 BESTEM PLACERING

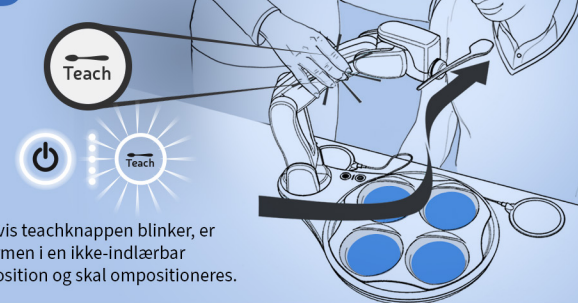


Grib fat i armen med tommelfingeren, så den dækker teachknappen på armen. Løft armens vægt op ved at støtte den. Flyt armen til den ønskede placering ud for brugerens mund. Når armen er i den ønskede position, slippes armen. Obi vil holde positionen.

9 AFSLUT LÆRINGSTILSTAND

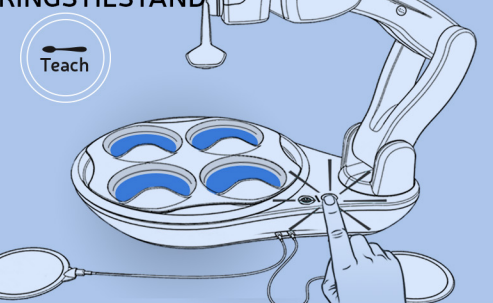


Tryk på teachknappen igen for at gemme positionen. Obi afslutter indlæringsstillingen og går tilbage til klargøringspositionen over skålen.


⚠ ADVARSEL: KVÆLNINGSFARE. Indlær ikke en leveringsposition inde i munden.

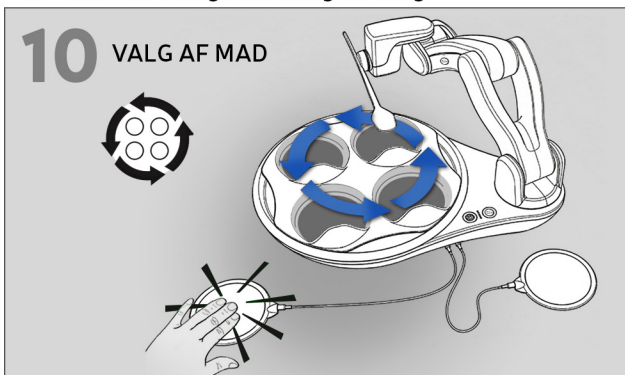


Tryk på vælgerknappen for at bevæge skeen mod uret.

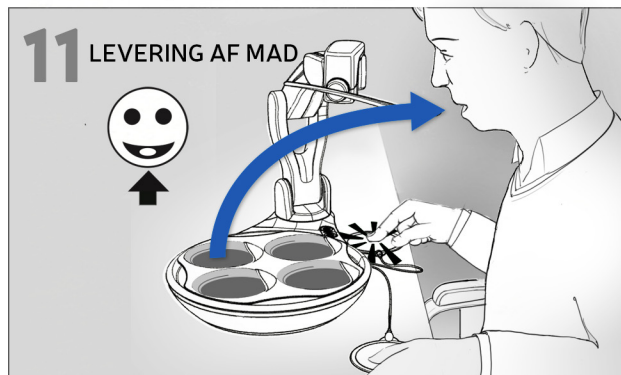


Tryk på leveringsknappen for at udtage og transportere mad til munden.

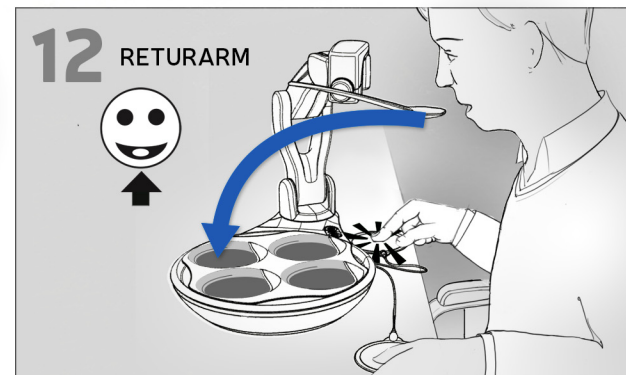


Tryk på leveringsknappen for at lægge skeen tilbage i skålen.

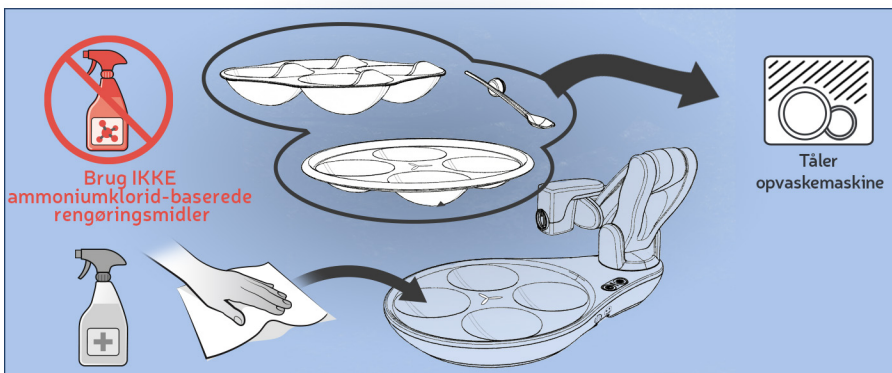

Rengør/desinficer tallerken, bordplade og bestik i en vask eller opvaskemaskine (øverste kurv). Rengør/desinficer Obis base og arm med en kompatibel opløsning. Se brugsanvisningen for yderligere information.

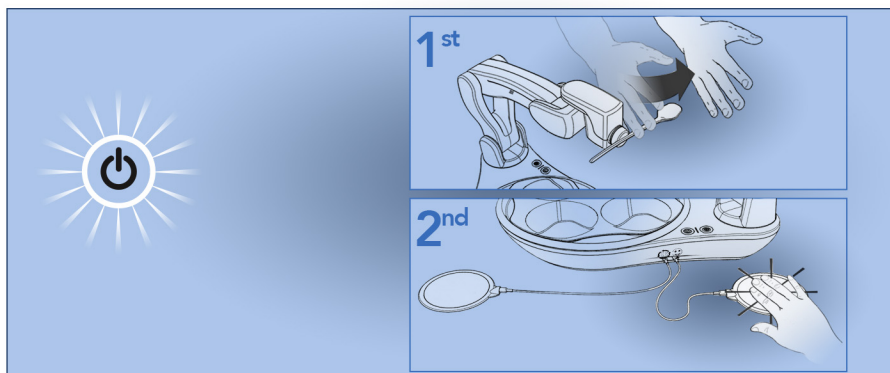

Hvis tænd/sluk-knappen blinker, skal du fjerne den blokerende genstand. Når den er fjernet, skal du trykke på en af knapperne, og armen vil genoptage sin bevægelse.

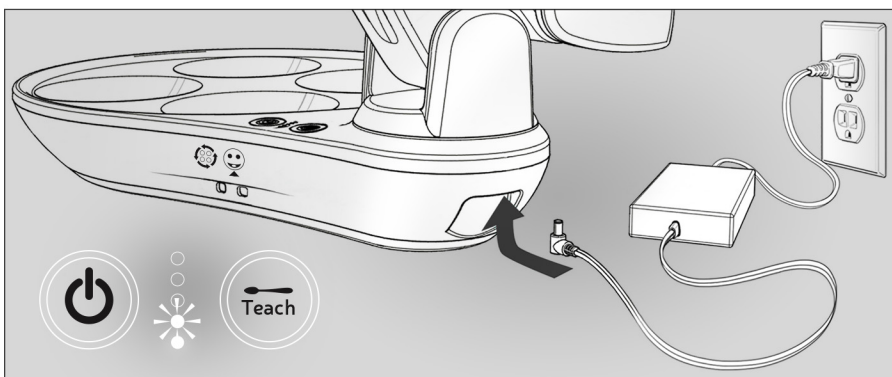

Tilslut opladningskablet. Alle batteriindikatorlamper lyser, når enheden er fuldt opladet. Når du opbevarer Obi i længere tid, skal du sørge for en opladning på 40-60% for at minimere risikoen for et dødt batteri.



Hvis du oplever et problem med Obi, kan du sende en e-mail til: service@meetObi.com eller ringe til: +1-844-435-7624.