



## 1 BEREID VOEDSEL

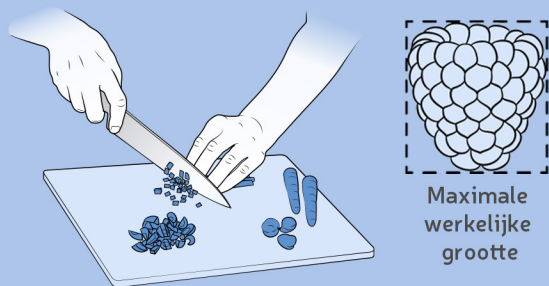


Vaste voedsel: Bereid stukken die niet groter zijn dan een framboos. Halfvaste voedsel: Voeg extra vloeistof toe aan plakkerige voeding, zoals havermout, aardappelpuree, macaroni met kaas, enz.

## 2 VUL KOMMEN

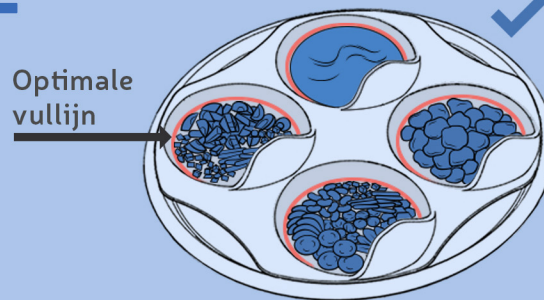


Vul de kommen tot aan de optimale vullijn, maar niet verder.

## 3 CONTROLEER VULNIVEAU

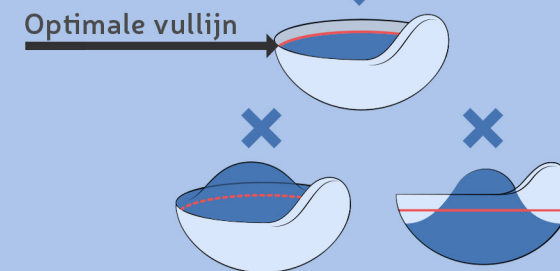


Zorg ervoor dat het voedsel niet boven of onder de optimale vullijn komt. Te weinig vullen wordt afgeraden.

## 4 STARTPOSITIE

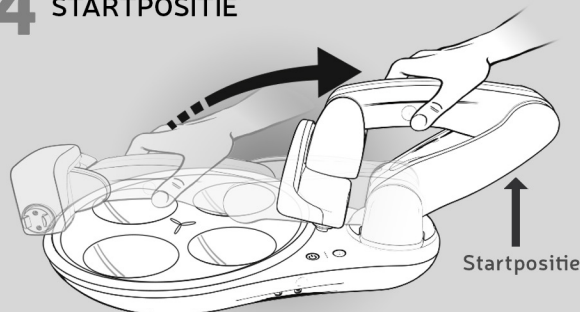


Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. Beweeg de arm langzaam naar de gebogen startpositie naast het bord, zoals afgebeeld. Het gevoel van weerstand is normaal. Obi gaat niet aan tenzij hij in de startpositie staat.

## 5 PLAATS BORD, PLACEMAT & SCHAKELAARS

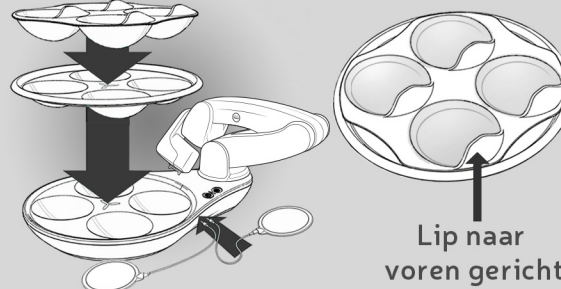


Maak het bord en het bestek schoon voor het eerste gebruik. Plaats de zwarte placemat en leg het bord er boven op. Sluit de schakelaars aan.

## 6 BEVESTIG BESTEK

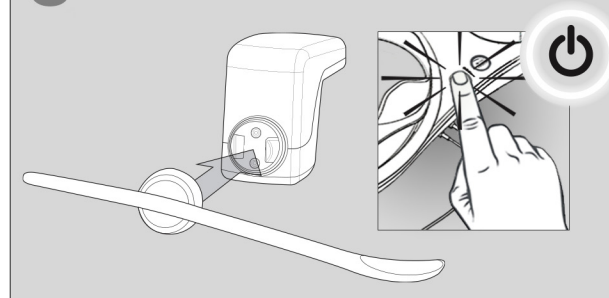


Bevestig het gewenste bestek en druk op de aan/uit-knop. Obi zal opstarten en buigen voor de maaltijd.

## 7 GA NAAR DE ONDERWIJSMODUS

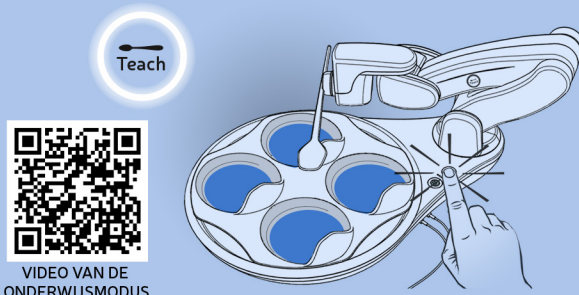

Plaats de gebruiker zodanig dat hij voldoende rechtop en stabiel zit. Druk op de teach-knop.


## 8 LOCATIE BERALEN

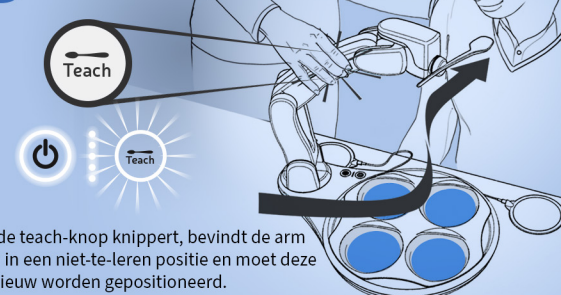

Als de teach-knop knippert, bevindt de arm zich in een niet-te-leren positie en moet deze opnieuw worden gepositioneerd.


Pak de arm vast met de duim over het teach-icoontje. Ondersteun het gewicht van de arm door hem omhoog te tillen. Beweeg de arm naar de gewenste positie buiten de mond van de gebruiker. Laat de arm los zodra hij op de gewenste locatie is. Obi zal de positie vasthouden.

## 9 VERLAAT DE ONDERWIJSMODUS

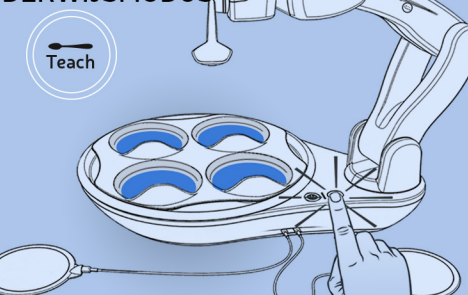


Druk nogmaals op de teach-knop om de positie op te slaan. Obi verlaat de teach-modus en beweegt naar de gereedheidspositie boven de kom. **⚠ WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR.** Stel geen positie in waarbij de afleverpositie in de mond is.


## ETEN

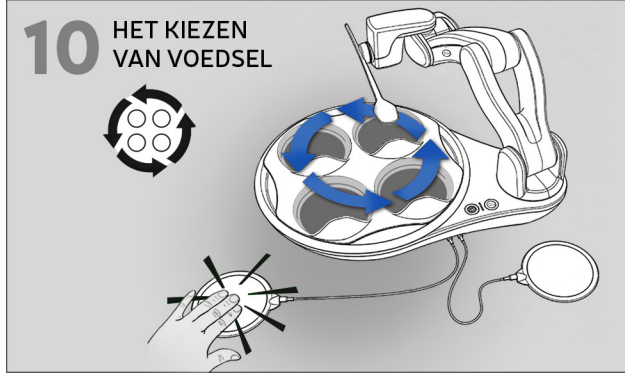

Druk op de keuzeschakelaar om het bestek tegen de klok in te draaien.

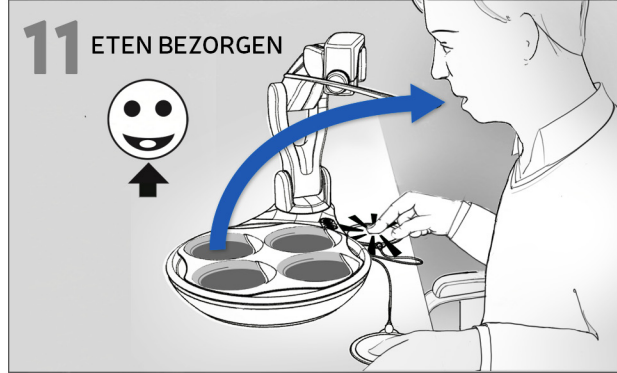


Druk op de bezorgknop om het eten op te scheppen en naar de ingestelde bezorglocatie te vervoeren.

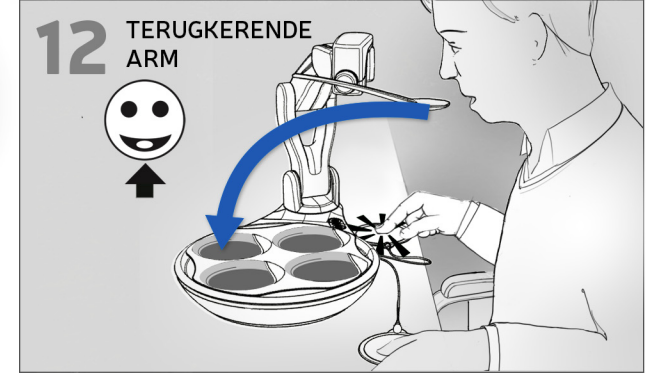


Druk op de schakelaar om de lepel terug naar het bord te brengen.

## SCHOONMAAK

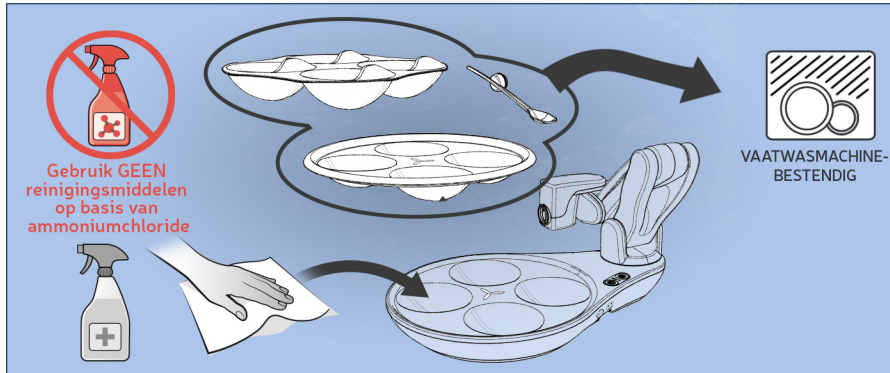


Reinig/desinfecteer het bord, de placemat en het bestek in een gootsteen of vaatwasser (bovenste rek). Reinig/desinfecteer de basis en arm van Obi met een passend schoonmaakmiddel. Zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

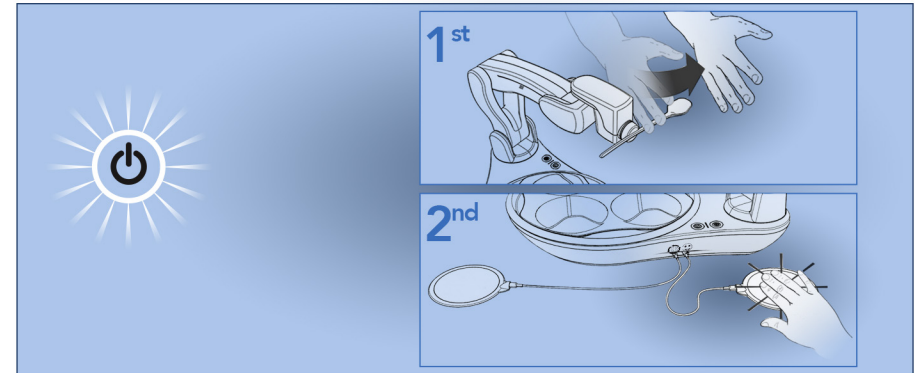

Als de aan/uit-knop knippert, verwijder dan het obstakel. Druk vervolgens op een van de schakelaars en de arm zal weer bewegen.

## BOTSING

## OPLADEN

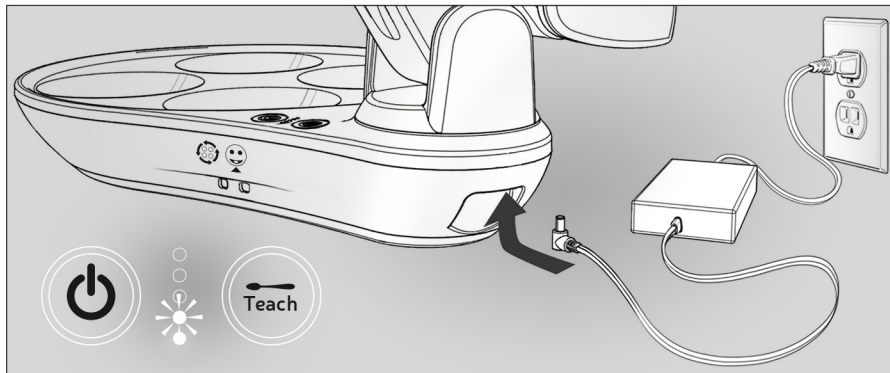

Sluit de oplaadkabel aan. Alle batterij-indicatorlampjes gaan branden wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Zorg bij langdurige opslag van Obi voor een lading van 40-60% om het risico op een lege batterij te minimaliseren.



Als u een probleem met Obi ondervindt, stuur dan een e-mail naar [service@meetObi.com](mailto:service@meetObi.com) of bel naar +1-844-435-7624.

## SERVICE/NAZORG