





1 PRÉPARER LA NOURRITURE

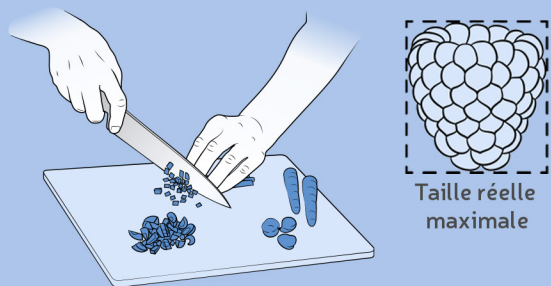

Solides : Préparez des morceaux ne dépassant pas la taille d'une framboise. Semi-solides : Ajoutez du liquide aux aliments collants, comme les flocons d'avoine, la purée de pommes de terre, les macaronis au fromage, etc.

2 REMPLISSAGE DES BOLS


Ligne de remplissage optimale

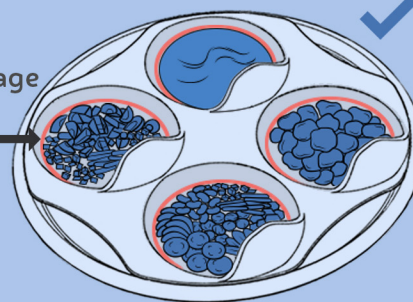

Remplissez les bols jusqu'à la ligne de remplissage optimale, mais sans la dépasser.


3 VÉRIFIER LE NIVEAU DE REMPLISSAGE

Ligne de remplissage optimale

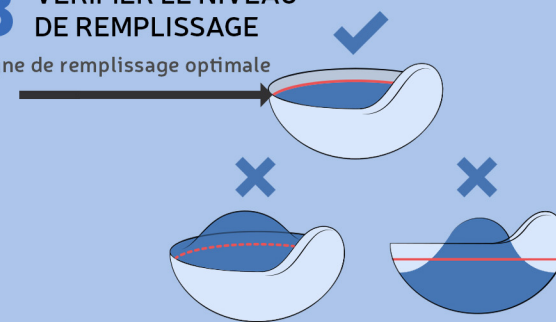


Assurez-vous que le niveau de remplissage des aliments ne dépasse pas la ligne de remplissage optimale. Un remplissage insuffisant est déconseillé.

4 POSITION DE DÉPART

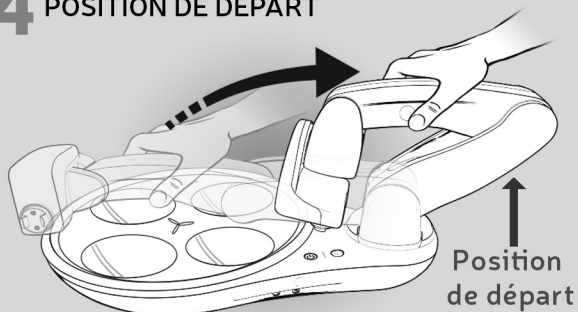


Placez l'appareil sur une surface plane. Déplacez lentement le bras jusqu'à la position de départ pliée, comme illustré. La sensation de résistance est normale. Obi ne s'allumera pas s'il n'est pas en position de départ.

5 ASSIETTE, PLATEAU ET CONTACTEURS

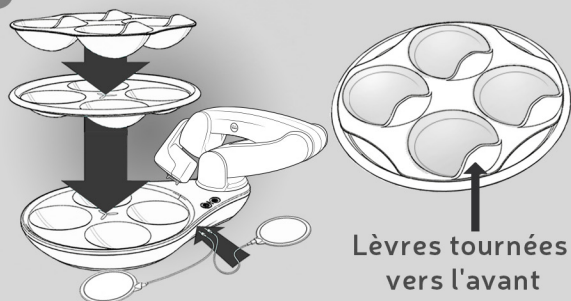


Nettoyer l'assiette et les ustensiles avant la première utilisation. Insérer le plateau noir, puis placer l'assiette dessus. Insérer les contacteurs.

6 FIXER L'USTENSILE

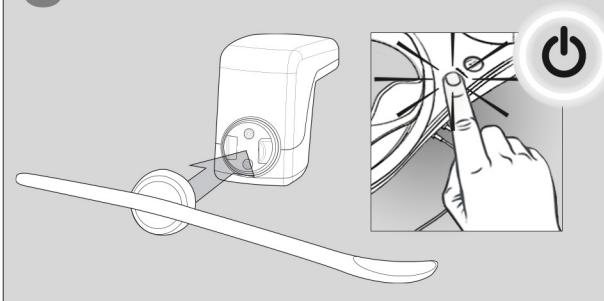


Fixez l'ustensile souhaité, puis appuyez sur le bouton d'alimentation. Obi s'allumera et s'inclinera devant le repas.

7 ENTRER EN MODE APPRENTISSAGE

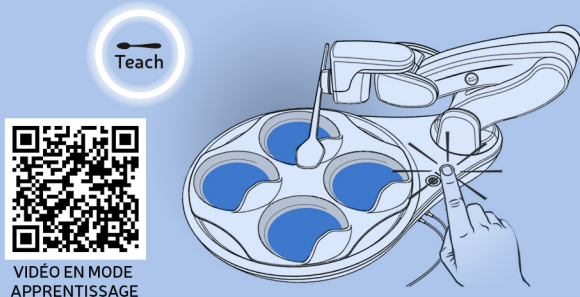

Positionnez l'utilisateur de manière à ce qu'il soit suffisamment droit et immobile. Appuyez sur le bouton d'apprentissage.


8 DÉTERMINER L'EMPLACEMENT

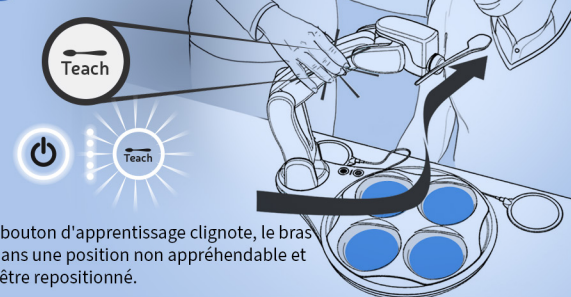

Si le bouton d'apprentissage clignote, le bras est dans une position non appréhendable et doit être repositionné.

Saisissez le bras du robot, en gardant le pouce sur le bouton d'apprentissage. Soutenez le poids du bras en le soulevant. Déplacez le bras jusqu'à l'emplacement souhaité, hors de la bouche de l'utilisateur. Une fois à l'endroit souhaité, relâchez le bras et le bouton d'apprentissage. Obi maintiendra la position.

9 QUITTER LE MODE D'APPRENTISSAGE

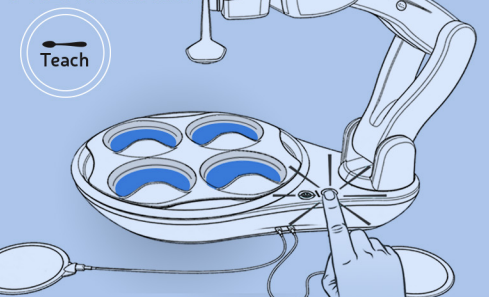

Appuyez à nouveau sur le bouton d'apprentissage pour enregistrer la position. Obi quittera le mode d'apprentissage et se placera en position de repos, au-dessus du bol.


⚠ AVERTISSEMENT: RISQUE D'ÉTOUFFEMENT. Ne pas enseigner une position d'arrivée à l'intérieur de la bouche.

⚠ AVERTISSEMENT: Risque d'électrocution. Ne confiez l'entretien de l'appareil qu'à un représentant agréé.

Pour usage domestique.


MANGER

10 CHOISIR LA NOURRITURE

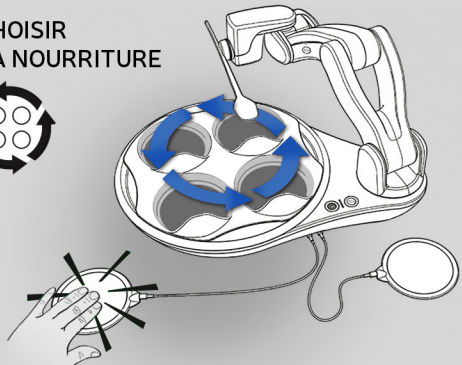


Appuyez sur le contacteur de sélection pour déplacer l'ustensile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

11 LIVRAISON DE NOURRITURE

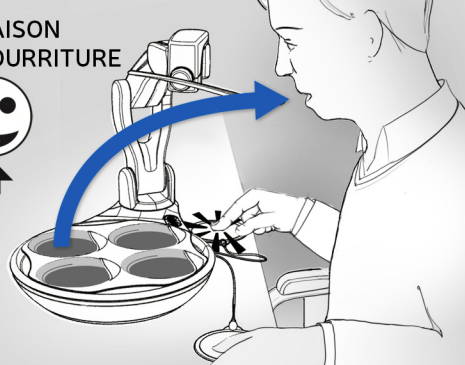

Appuyez sur l'contacteur de livraison pour ramasser et transporter les aliments jusqu'au lieu de livraison.

12 BRAS DE RETOUR

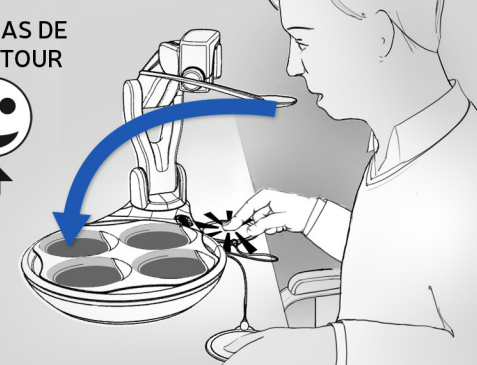


Appuyez sur le contacteur de livraison pour remettre la cuillère dans le bol.


NETTOYAGE



N'utilisez PAS de nettoyants à base de chlorure d'ammonium

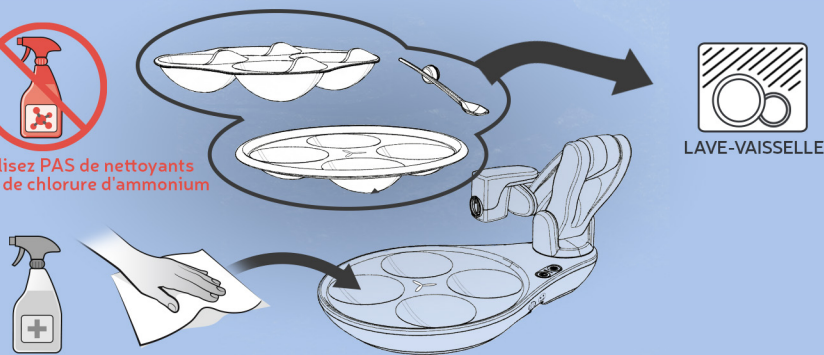


Nettoyez/désinfectez l'assiette, le support et les ustensiles dans un évier ou un lave-vaisselle (panier supérieur). Nettoyez/désinfectez la base et le bras du Obi avec une solution compatible. Consultez le mode d'emploi pour plus d'informations.

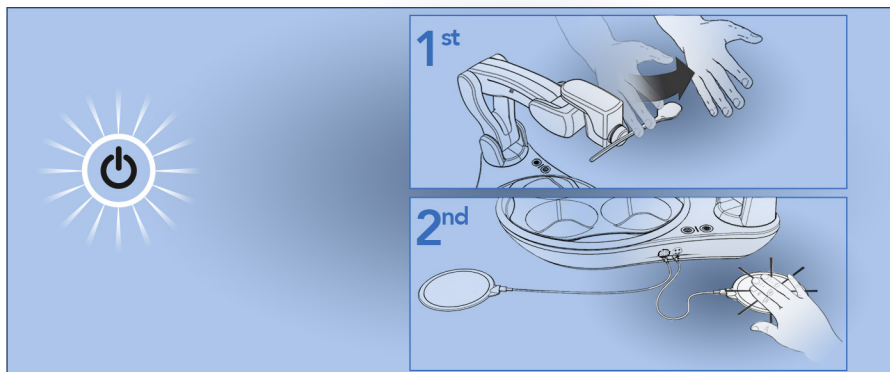

COLLISION

Si le bouton d'alimentation clignote, retirez l'objet gênant. Une fois retiré, appuyez sur l'un des contacteurs pour que le bras reprenne son mouvement.

CHARGEMENT

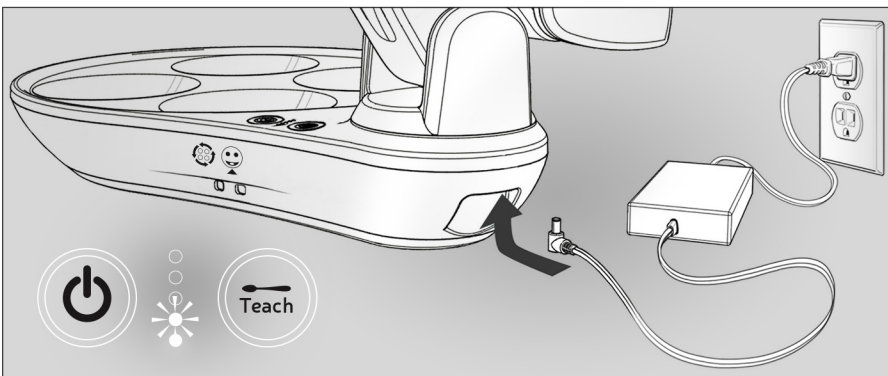

Branchez le câble de charge. Tous les voyants de batterie s'allumeront lorsque l'appareil sera complètement chargé. En cas de stockage prolongé du Obi, veillez à ce que la batterie soit chargée à 40-60 % afin de minimiser le risque de décharge complète.



SERVICE

Si vous rencontrez un problème avec Obi, envoyez un e-mail à: service@meetObi.com ou appelez le: +1-844-435-7624.