



1 TILBERED MAT

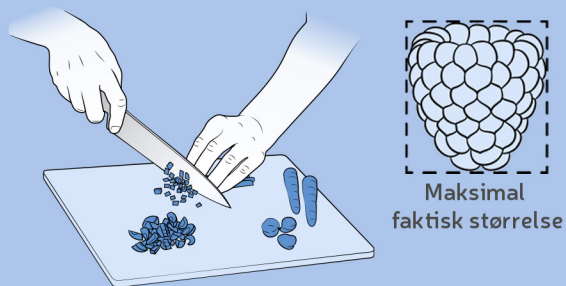

Faste stoffer: Lag biter som ikke er større enn størrelsen på et bringebær. Halvfaste stoffer: Tilsett ekstra væske til klissete matvarer, f.eks. havregryn, potetmos, makaroni og ost osv.


Hurtigstartveiledning

2 FYLL SKÅLER

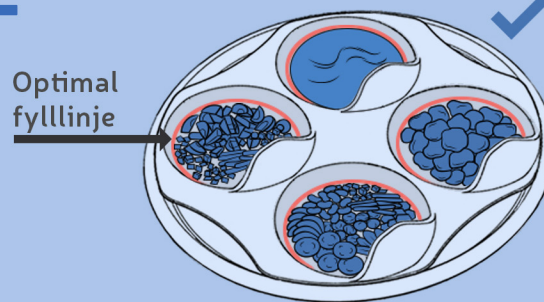


Fyll bollene opp til, men ikke over, den optimale fyllelinjen.

3 SJEKK FYLLINGSNIVÅET

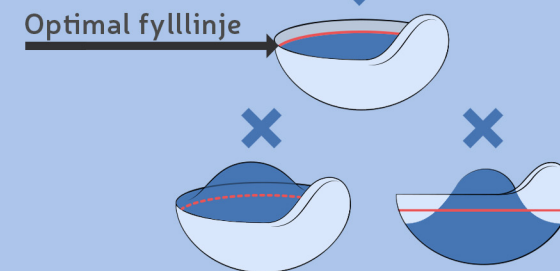


Sørg for at maten ikke er over eller under den optimale fyllelinjen. Det anbefales ikke å fylle for lite.

4 STARTPOSISJON

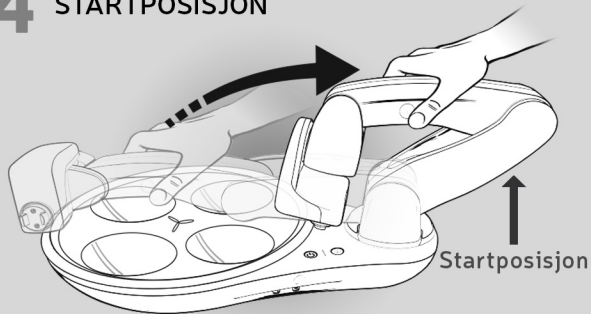


Plasser enheten på en flat overflate. Beveg armen sakte til den bøyde startposisjonen, som vist. Det er normalt at du føler motstand. Obi vil ikke slå seg på med mindre den er i startposisjon.

5 INNLEGGSTALLERKEN, PLAKETBRITTE OG BRYTERE

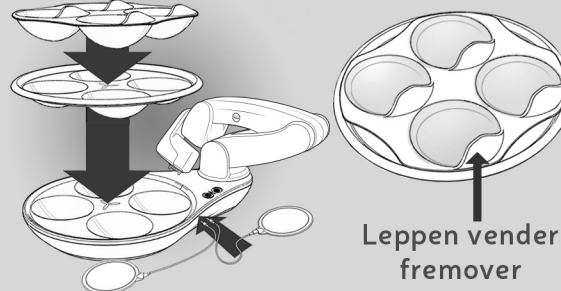


Rengjør tallerken og redskap før første gangs bruk. Legg den svarte bordbrikken oppå. Sett inn bryterne.

6 FEST REDSKAPET

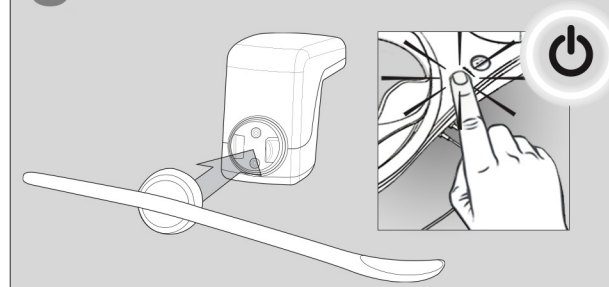


Fest ønsket redskap, og trykk deretter på av/på-knappen. Obi vil slå seg på og bukke før måltidet.

7 GÅ INN I LÆREMODUS

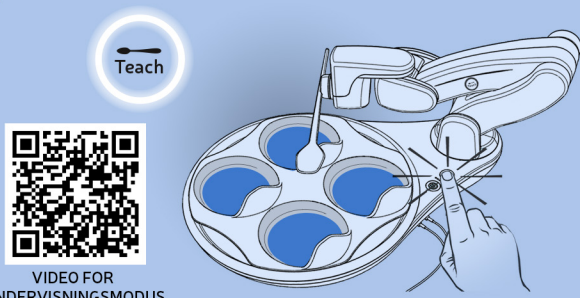

Plasser brukeren slik at den er tilstrekkelig oppreist og stasjonær. Trykk på læreknappen.


8 BESTEM PLASSERING

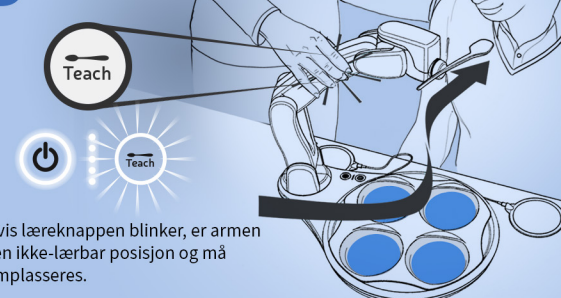

Hvis læreknappen blinker, er armen i en ikke-lærbar posisjon og må omplasseres.


Grip armen med tommelen slik at den dekker læreikonet. Støtt vekten av armen ved å løfte den opp. Beveg armen til ønsket leveringssted utenfor brukerens munn. Når du er på ønsket sted, slipp armen. Obi vil holde posisjonen.

9 AVSLUTT LÆREMODUS

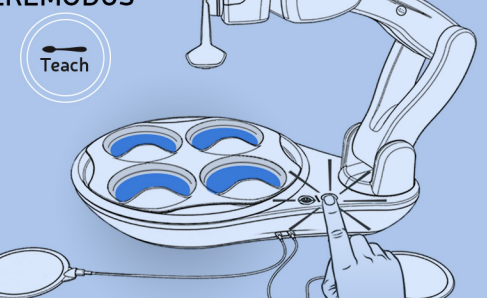


Trykk på læreknappen igjen for å lagre posisjonen. Obi vil gå ut av læremodus og gå til klarposisjonen over bollen. **⚠ ADVARSEL: KVELNINGSFARE.** Ikke lær inn en leveringsposisjon inne i munnen.


Hurtigstartveiledning

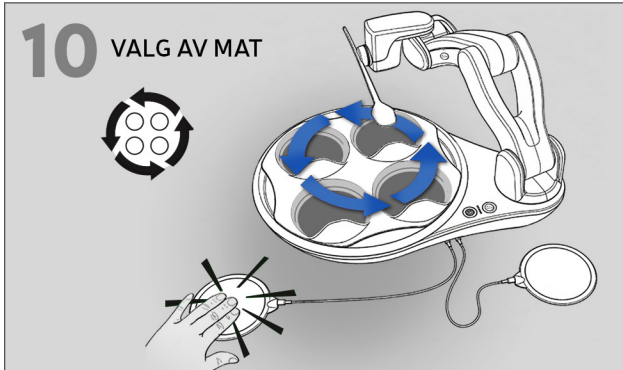


Trykk på valgbryteren for å bevege redskapet mot klokken.

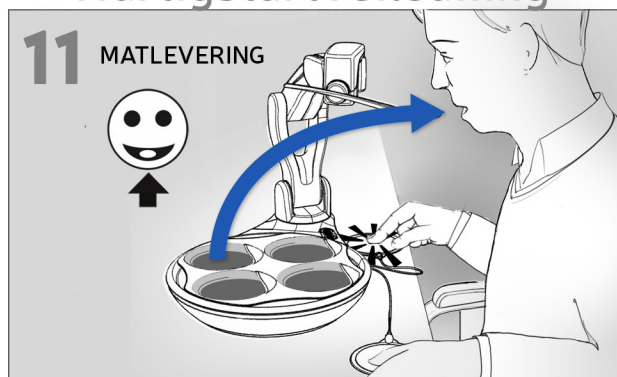


Trykk på leveringsbryteren for å øse og transportere maten til leveringsstedet.

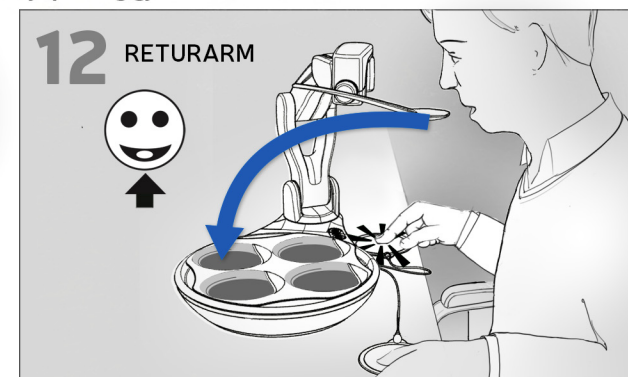


Trykk på utleveringsbryteren for å sette skjeen tilbake i bollen.

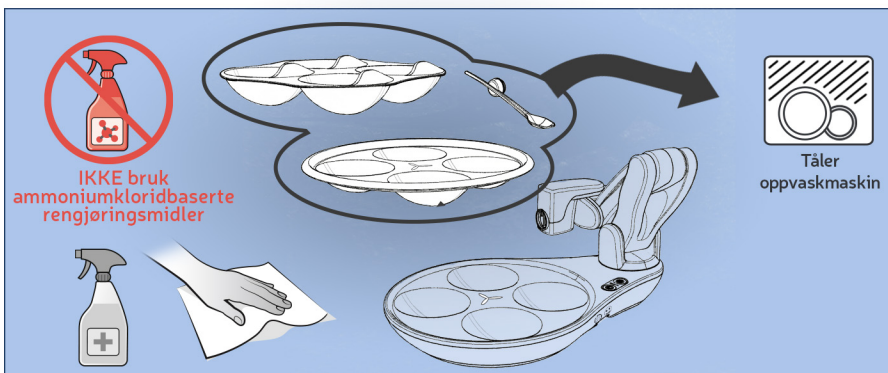

Rengjør/desinfiser tallerkenen, oppvasken og bestikket i en vask eller oppvaskmaskin (øverste kurv). Rengjør/desinfiser Obis base og arm med en kompatibel løsning. Se bruksanvisningen for mer informasjon.

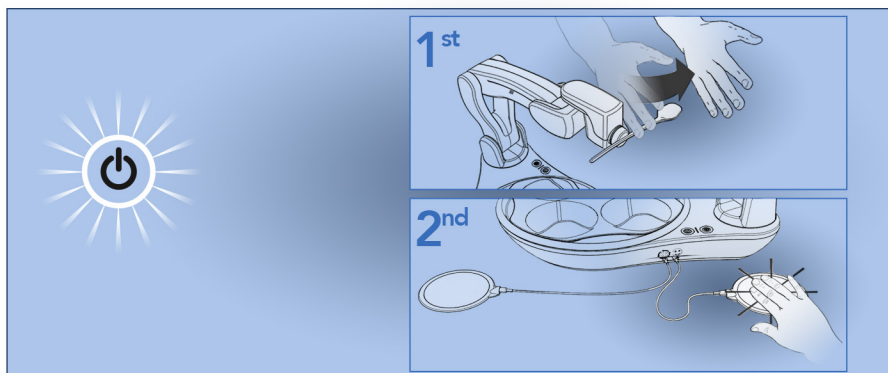

Hvis av/på-knappen blinker, må du fjerne den blokkerende gjenstanden. Når den er fjernet, trykker du på en av bryterne, og armen vil gjenoppta bevegelsen.

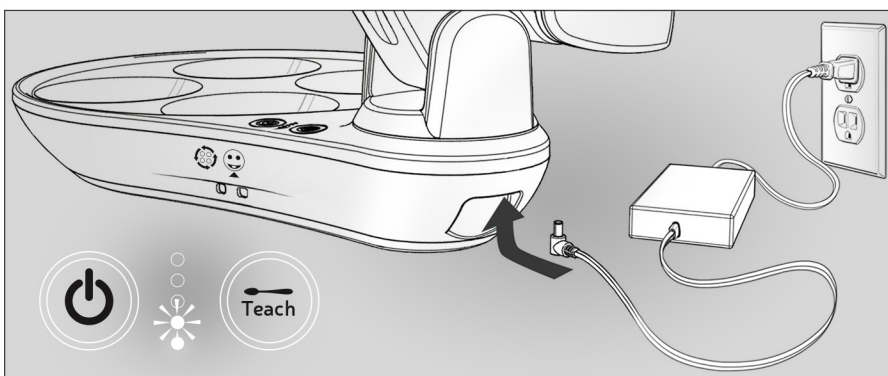

Koble til ladekabelen. Alle batteriindikatorlampene lyser når enheten er fulladet. Når du oppbevarer Obi over lengre tid, sørg for at batteriet er ladet til 40–60 % for å minimere risikoen for at batteriet blir utladet.



Hvis du opplever et problem med Obi, kan du sende en e-post til service@meetObi.com eller ringe +1-844-435-7624.